


Udfyld Navn

Indtast tidligere valgt kodeord og gentag samme kodeord


Slut af med klik på Opret bruger




Klik på Login

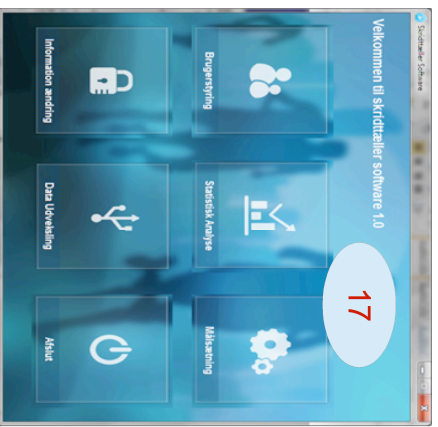

God fornøjelse med dit Seagull produkt

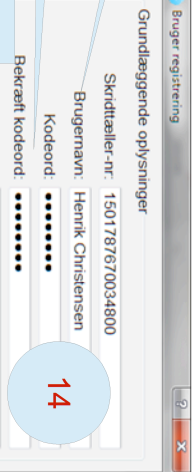

Klik på OK

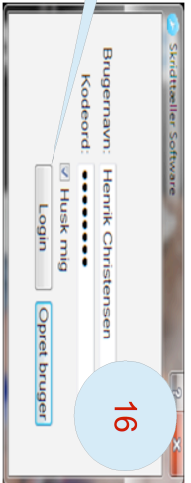


Du er nu klar til at arbejde med programmet

Kundeservice
www.seagull-healthcare.dk
61715035

Download vejledning skridttæller

www.seagull-healthcare.dk


Klik på motion

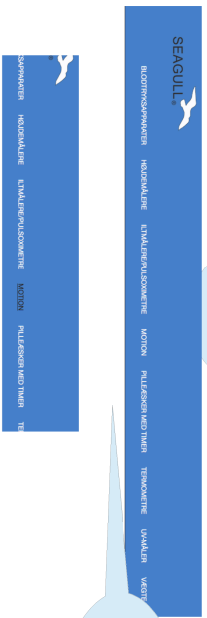

Find skridttælleren




Klik her

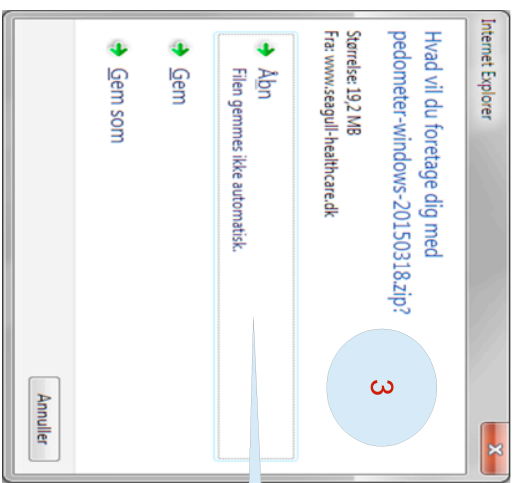

Klik her

Afhængig af windows-version
Klik her

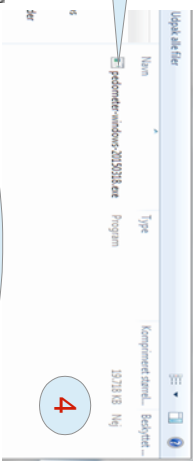


Afhængig af windows-version
Klik her



Klik på next




Klik på I agree

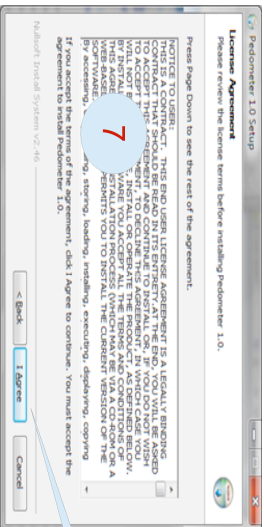

Klik på Install



Vælg dansk,
eller et andet
sprog

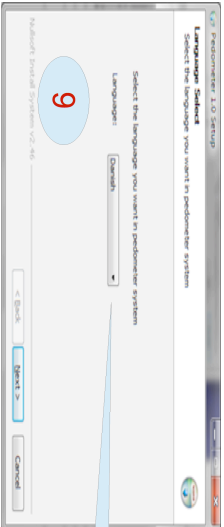


Sæt flueben her



Klik her

Indtast brugernavn

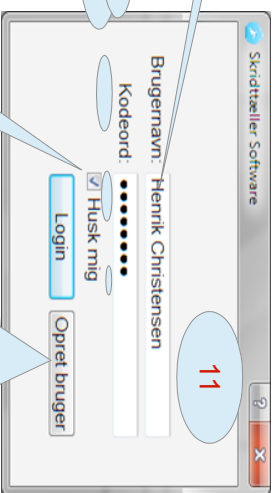

Skriv et kode ord du kan huske

Klik opret bruger
(login bruges senere)



Sæt
Flueben
her

Tilslut
skridttæller
til PC med
USB kabelt
og klik her

Klik på få Skridttæller-nr.

